


# ReVeneer™




**Solución para las  
fracturas de cerámica**

# Tiene solución

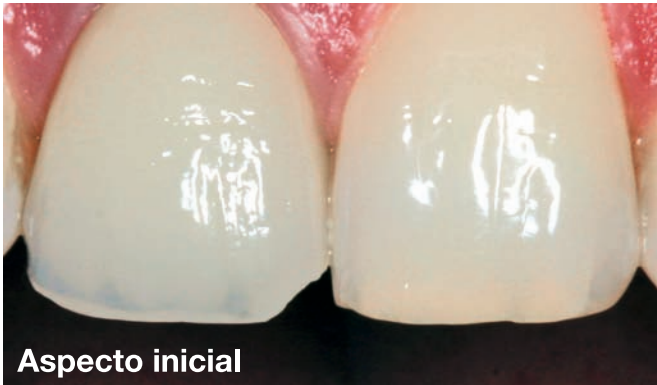

Las fracturas de cerámica en zonas estéticas tienen solución con el nuevo sistema **ReVeneer™**

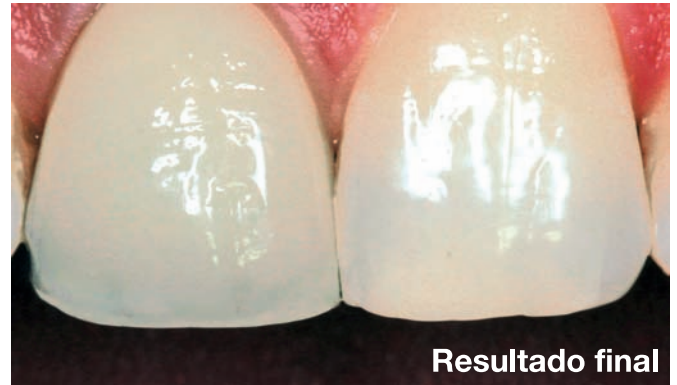

Consiste en la simple aplicación de una primera pasta reparadora y composite evitando la necesidad de la confección de una nueva prótesis.

**Resultado estético y predecible**

## Ventajas de ReVeneer™ :

- Sin grabado ácido (ni fluorhídrico ni fosfórico)
- Técnica intraoral
- No utiliza Silano como primer (se hidroliza)
- Gran adhesividad
- Uso universal
- Aplicable sobre todo tipo de cerámicas (feldespáticas y cristalinas, cerámicas inyectadas, zirconio y óxido de aluminio)
- Polimerizado con lámparas convencionales (halógenas, LED y plasma)

**Sólo con la aplicación de los dos componentes necesarios se obtienen muy buenos resultados estéticos y funcionales.**

El color verde de la pasta reparadora permite la aplicación precisa sobre la zona.



El Dr. Gerrit Meyer MDD de la universidad clínica afirma con entusiasmo: **El color verde facilita mucho el trabajo por el contraste que ofrece.**

## Caso clínico de una fractura de cerámica restaurada con ReVeneer™



Aspecto inicial



Fresar con diamante para dar aspereza a la superficie



Aplicación **ReVeneer™** primer



Aplicación **ReVeneer™** opaquer




Pincelado **ReVeneer™** opaquer



Tras 2 minutos aplicar la pasta **ReVeneer™**



Pincelado de la pasta reparadora **ReVeneer™**

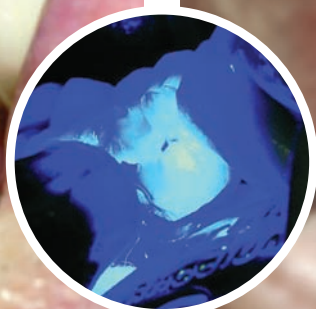

Polimerizado durante 40 seg.



Resultado final

# Unidades de envase del sistema ReVeneer™

## Sets

Set adhesivo (Nº art.:232205)

- 1 jeringa (1 g) ReVeneer™ base
- 1 botella (3 ml) ReVeneer™ primer
- 12 aplicadores (0,9x13 mm)
- 1 mango para el cepillo
- 6 cepillos



Set reparador ReVeneer (Nº art. 232220)

- 1 jeringa (1g) ReVeneer™ base
- 1 botella (3ml) ReVeneer™ primer
- 12 aplicadores (0,9x13 mm)
- 1 mango para el cepillo
- 6 cepillos
- 1 jeringa (3 g) opaquer universal claro
- 1 jeringa (3 g) opaquer universal oscuro
- 6 cartuchos de composite A3.5 (0,3 g)
- 3 cartuchos de composite A3 (0,3 g)
- 2 cartuchos de composite A2 (0,3 g)
- 1 cartucho de composite B2 (0,3 g)



## Recambios

Nº Art:	Descripción del artículo	Contenidos
232210	ReVeneer™ base	1.0 g
232211	ReVeneer™ primer	3.0 ml
232220	ReVeneer™ opaquer universal claro	3.0 g
232221	ReVeneer™ opaquer universal oscuro	3.0 g
232233	ReVeneer™ composite A3.5	3 cartuchos de 0.3 g
232232	ReVeneer™ composite A3	3 cartuchos de 0.3 g
232231	ReVeneer™ composite A2	3 cartuchos de 0.3 g
232236	ReVeneer™ composite B2	3 cartuchos de 0.3 g

